



Ooggel

extra hydratatie

© 93001168 / 21F1

Lees deze informatie zorgvuldig voor het gebruik van A.Vogel Ooggel extra hydratatie. Gooi deze gebruiksaanwijzing niet weg, het bevat belangrijke informatie. Wanneer u vragen heeft over dit product, stel deze dan aan uw arts of neem contact op met de fabrikant.

Wat is A.Vogel Ooggel extra hydratatie en waarvoor gebruikt u het?

- A.Vogel Ooggel extra hydratatie is een medisch hulpmiddel en bevat Ectoin®, een 100% natuurlijk ingrediënt met celbeschermende en ontstekingsremmende eigenschappen.
- A.Vogel Ooggel extra hydratatie is een visceuze isotone oplossing en kan gebruikt worden voor de behandeling en preventie van droge, geïrriteerde en ontstoken ogen.
- A.Vogel Ooggel extra hydratatie vermindert een branderig gevoel, jeuk en het gevoel dat er iets in het oog zit, en vermindert door allergenen veroorzaakte ontstekingen van het bindvlies. Het verlicht allergische symptomen, zoals rode, jeukende en tranende ogen.
- A.Vogel Ooggel extra hydratatie beschermt tegen de schadelijke invloeden van allergenen en ondersteunt het herstelproces van geïrriteerd en gevoelig bindvlies. Bijvoorbeeld de wondgenezing na oogoperaties of oogletsel. Op basis van preklinische gegevens biedt A.Vogel Ooggel in vergelijking tot oogdruppels een intensieve en langere hydratatie van droge en geïrriteerde ogen, vanwege de verlengde retentietijd.
- A.Vogel Ooggel extra hydratatie stabiliseert de lipidelaag van de traanfilm, vermindert verdere uitdroging en beschermt de oogcellen tegen uitdroging van de buitenste cellen van het hoornvlies als gevolg van hyperosmolariteit.
- A.Vogel Ooggel extra hydratatie is geschikt voor alle leeftijden, voor dragers van contactlenzen en voor gevoelige ogen. Het werkt ook preventief.
- A.Vogel Ooggel extra hydratatie is vrij van conserveringsmiddelen en fosfaten. Het effect is gebaseerd op 100% natuurlijke ingrediënten.
- A.Vogel Ooggel extra hydratatie kalmeert en verzacht geïrriteerde en vermoeide ogen.
- Het is toegestaan om A.Vogel Ooggel extra hydratatie te gebruiken na oogoperaties om wondgenezing te ondersteunen.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- A.Vogel Ooggel extra hydratatie niet gebruiken wanneer u overgevoelig bent voor Ectoin® of een van de andere ingrediënten.

- Als er allergische reacties optreden als gevolg van het product, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van A.Vogel Ooggel extra hydratatie.
- Niet gebruiken als het product beschadigd is.
- Uit hygiënisch oogpunt mag het flesje slechts door één persoon worden gebruikt.
- Na opening is het product nog 3 maanden houdbaar.
- Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
- Houd er rekening mee dat na het aanbrengen van A.Vogel Ooggel extra hydratatie uw gezichtsvermogen tijdelijk verminderd kan zijn. In dit geval mag er geen voertuig worden bestuurd en mogen geen machines worden bediend. Daarom wordt aanbevolen om te wachten tot de normale gezichtsscherpte is teruggekeerd.

Wat moet u weten voordat u A.Vogel Ooggel extra hydratatie gebruikt?

Er zijn geen gegevens wat betreft interacties tussen A.Vogel Ooggel extra hydratatie en andere oogdruppels of oogzalven. Daarom wordt het gebruik van A.Vogel Ooggel extra hydratatie met andere oogheelkundige producten niet aanbevolen.

Hoe gebruikt u A.Vogel Ooggel extra hydratatie?

Gebruik A.Vogel Ooggel extra hydratatie altijd volgens deze gebruiksaanwijzing. Indien u twijfelt, raadpleeg dan voor gebruik uw arts of apotheker. Breng *1-2 druppels per oog*, meerdere keren *per dag of 's nachts* aan, tenzij anders is geadviseerd. Kinderen jonger dan 2 jaar mogen in totaal niet meer dan *7 applicaties (1-2 druppels per oog) per dag* aanbrengen. Er is geen dosisbeperking voor personen ouder dan 2 jaar. Indien noodzakelijk, kan A.Vogel Ooggel extra hydratatie meerdere keren per uur worden gebruikt. A.Vogel Ooggel extra hydratatie is geschikt voor kinderen. Niettemin, kinderen van 10 jaar of jonger, en mensen die niet in staat zijn om deze ooggel zelfstandig te gebruiken, moeten door een volwassene geholpen worden bij de toediening.

1. Scheur voordat u A.Vogel Ooggel extra hydratatie voor het eerst gebruikt, de beschermende verzegeling van het flesje.
2. Het wordt aanbevolen om voor gebruik van A.Vogel Ooggel extra hydratatie uw handen te wassen.
3. Verwijder het beschermddopje van het flesje en vermijd aanraking van de blootgestelde dop.
4. Buig uw hoofd lichtjes naar achteren.

- Houd het flesje ondersteboven in één hand, tussen uw duim en wijsvinger of middelvinger. Houd het flesje zo verticaal mogelijk.
- Open voorzichtig uw oog met uw duim en wijsvinger van de andere hand of trek uw onderste ooglid voorzichtig naar beneden om een buidel of zak te vormen.
- Plaats de punt van het flesje dicht bij uw onderste ooglid, maar laat het uw oog niet raken.
- Laat een druppel in het gevormde zakje vallen tussen uw oog en ooglid door zachtjes te knijpen in de fles.
- Sluit het oog langzaam, zodat de vloeistof zich gelijkmatig over het oogoppervlak kan verdelen.
- Herhaal de procedure voor het andere oog.
- Plaats het dopje na elk gebruik van de A.Vogel Ooggel extra hydratatie voorzichtig terug.

Gebruik tijdens zwangerschap of borstvoeding

Als dit product wordt toegepast volgens de gebruiksaanwijzing, is er geen bewijs voor een bepaald risico tijdens zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding.

Mogelijke bijwerkingen van A.Vogel Ooggel extra hydratatie

A.Vogel Ooggel extra hydratatie wordt goed verdragen. Regelmatig voorkomende of aanhoudende bijwerkingen zijn tot nu toe niet bekend. In enkele gevallen kan A.Vogel Ooggel extra hydratatie mogelijk kortdurende oogirritatie veroorzaken of rode ogen of bindvliesontsteking. Merkt u bijwerkingen na gebruik van dit middel, geef dit dan door aan uw arts of aan A.Vogel B.V. Neem contact op met uw arts of apotheker als de oogklachten aanhouden of verergeren.

Ingrediënten

Ectoin®, hydroxyethylcellulose, natriumchloride, water, citraatbuffer.

Bewaren

De vervaldatum van A.Vogel Ooggel extra hydratatie staat vermeld op de verpakking en op het flesje. Niet gebruiken na de vervaldatum. Bewaren tussen 2°C - 25°C.

Verpakking

A.Vogel Ooggel extra hydratatie is verkrijgbaar in een verpakking van 10 ml.

Persoonlijk advies

Wilt u meer informatie of een persoonlijk advies? Kijk dan op www.avogel.nl of bel met de A.Vogel gezondheidslijn 0900 - 246 46 46 of stuur een e-mail naar info@avogel.nl.

Tips

- Maak zo veel mogelijk gebruik van natuurlijk daglicht en werk niet te lang achtereen met een beeldscherm.
- Draag contactlenzen niet langer dan de fabrikant aanbeveelt.
- Draag eventueel een zonnebril om lichtirritatie te voorkomen.
- Maak zo min mogelijk gebruik van airconditioning, kies liever voor een open raam.
- Probeer niet te lang aaneengesloten tv te kijken.

Zorg voor het milieu

A.Vogel streeft ernaar het milieu zo min mogelijk te belasten. Daarom maken we zoveel mogelijk gebruik van milieuvriendelijk geproduceerde verpakkingsmaterialen. Deze materialen hebben bij verbranding geen schadelijke effecten op het milieu of zijn geschikt voor recycling.



Fabrikant

bitop AG
Stockumer Str. 28,
58453 Witten, Germany

Distributeur

A.Vogel B.V.
J.P. Broekhovenstraat 16,
8081 HC Elburg, Nederland
0900 - 246 46 46

De tekst van deze gebruiksaanwijzing werd voor het laatst gewijzigd in juni 2021.



Fabrikant



CE-symbool met notifiedbodynummer



Gebruiksaanwijzing lezen



Gebruiksaanwijzing lezen (met betrekking tot waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen)



Lotnummer



Te gebruiken tot (vervaldatum)



Het product is steriel door aseptische filtratie



Temperatuurgrenzen voor bewaring



Niet gebruiken als het product beschadigd of doorboord is