




Amplicomms BigTel 40 Plus

Snelstartgids

Welkom op de snellestartgids pagina van de Amplicomms BigTel 40 Plus. Wij begeleiden je in 3 stappen naar een goedwerkend toestel.

Klik op Doorgaan om te beginnen.

Doorgaan

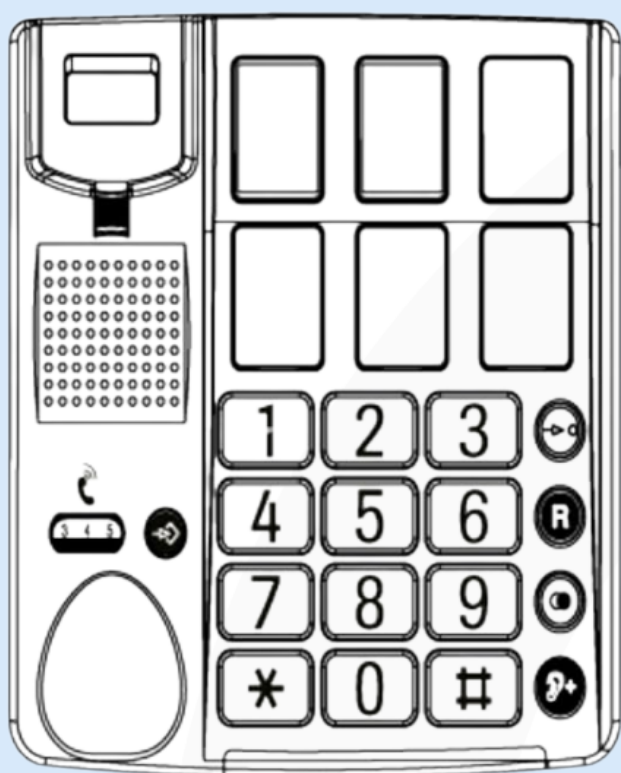

1. Uitpakken & aansluiten

Controleer of je alles hebt:

- ✓ Telefoon
- ✓ Premium-hoorn + spiraalkabel
- ✓ Telefoonkabel
- ✓ Wandbeugel (optioneel)
- ✓ Handleiding

Aansluiten

1. Verbind de hoorn met de zijkant van het toestel (gebruik de spiraalkabel).
2. Steek de telefoonkabel in de wandcontactdoos/modem én het toestel.

Optioneel: gebruik de wandbeugel voor muurmontage.

Doorgaan



2. Volume & beltoon instellen


Aan de rechterkant van het toestel vind je vier schuifjes

Knop	Regelt het...	Voor wie / waarom?
1	Toonhoogte van het ontvangstgeluid	Versta je anderen slecht aan de lijn?
2	Volume van jouw microfoon	Word je slecht verstaan?
3	Toonhoogte van de beltoon	Moeite met bepaalde geluidstonen?
4	Volume van de beltoon	Hoor je de telefoon slecht overgaan?

Extra:


- Draai aan de volumeknop (onder de hoorn) om het hoornvolume aan te passen.
- Druk op de versterkerknop  voor +40 dB extra luid geluid. (Geschikt voor hoortoestellen!)

Doorgaan

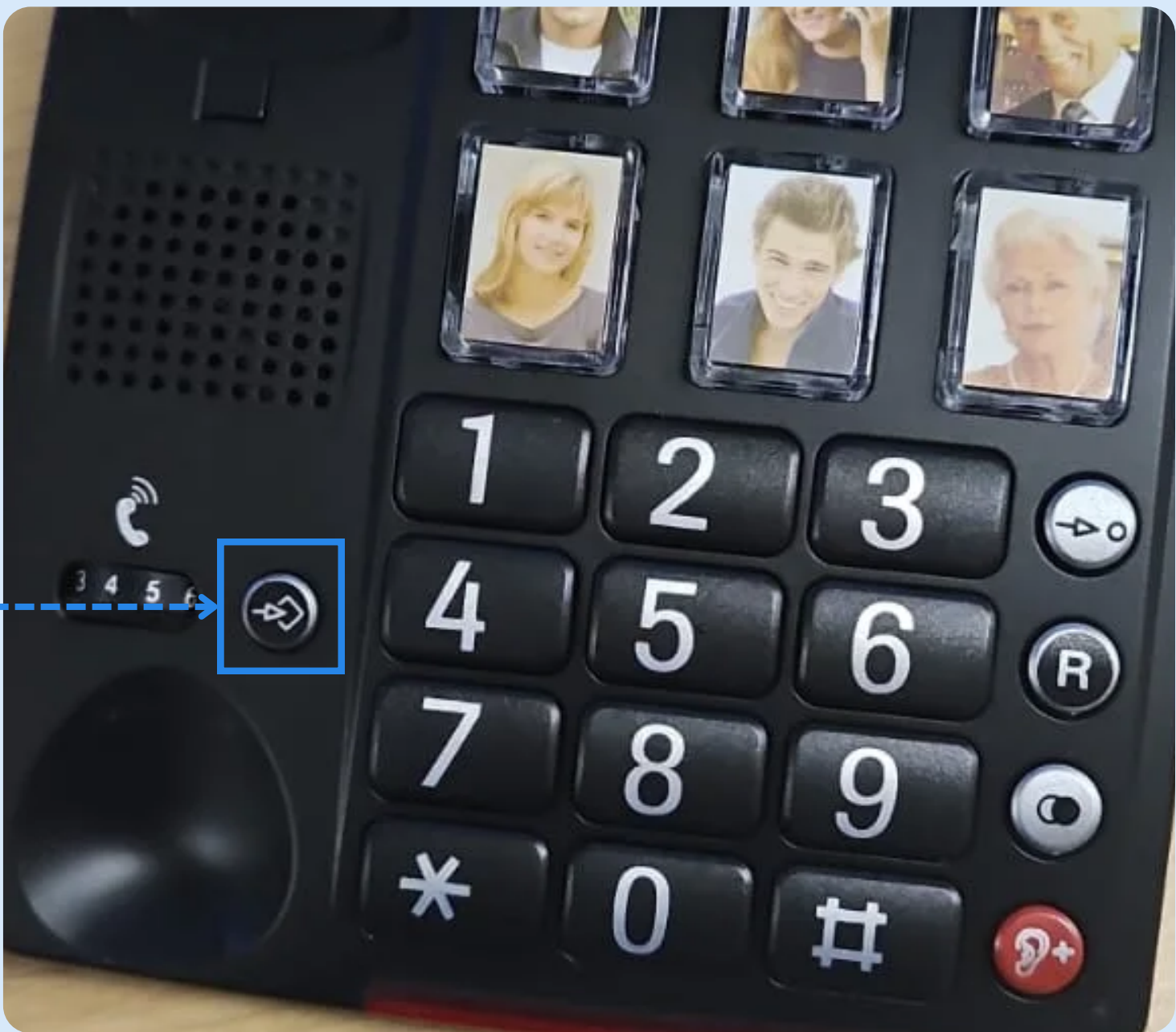

3. Geheugentoetsen instellen

Foto-geheugentoetsen (M1 t/m M6)

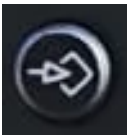
1. Neem de hoorn op
2. Druk op de programmeer toets 
3. Voer nummer in → Druk nogmaals op de programmeer toets
4. Druk op de gewenste fototoets (M1 t/m M6)
5. Leg de hoorn neer. Het telefoonnummer is opgeslagen.

 *Tip: plaats een foto onder het doorzichtige kapje*

Snelkiesnummers (toetsen 0-9)

- Volg dezelfde stappen zoals hierboven, maar druk bij Stap 4 op 0–9.

Doorgaan

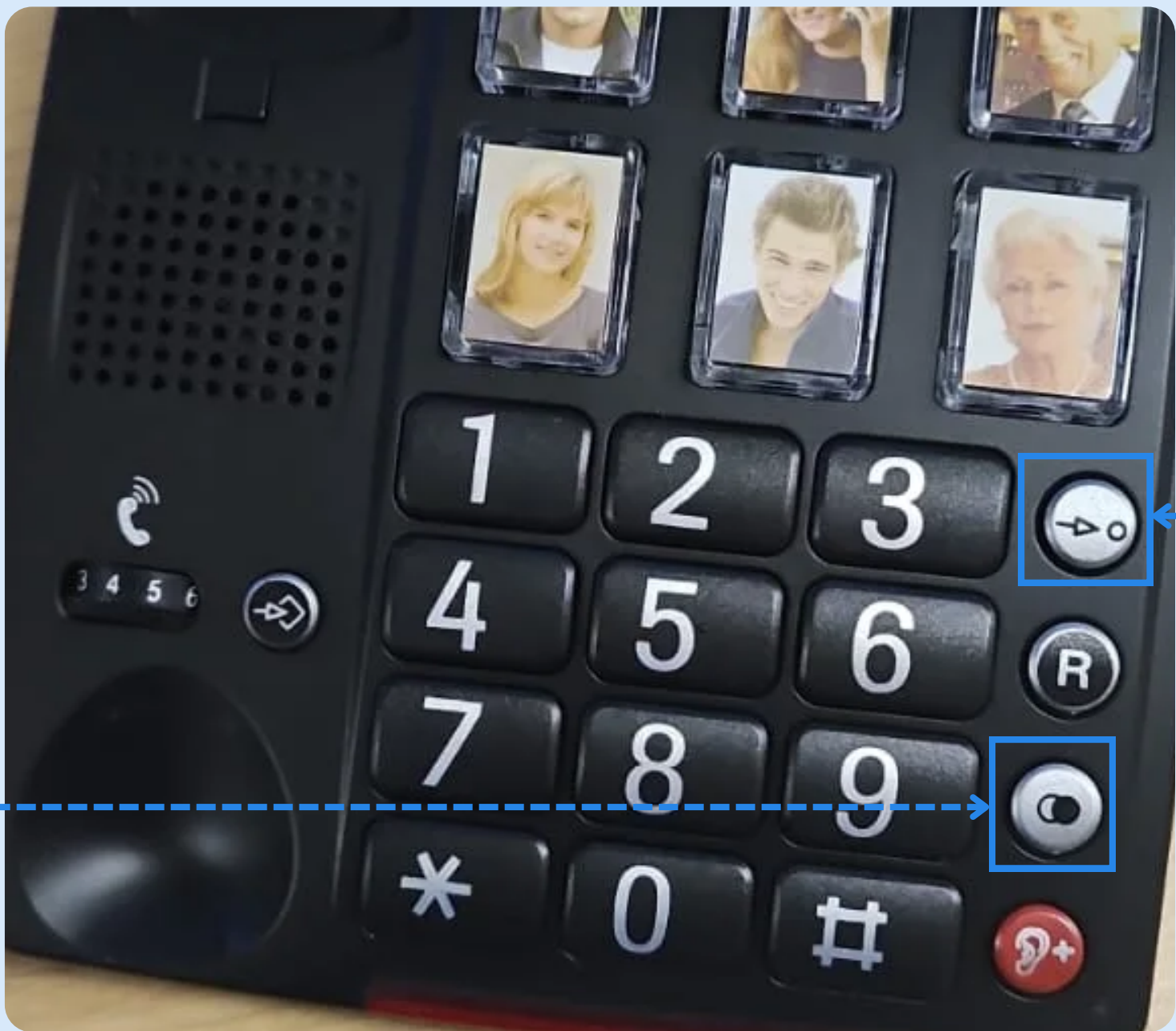

4. (Snelkiesnummers) bellen

Normaal bellen

1. Neem de hoorn op
2. Kies een nummer
3. Ophangen = gesprek beëindigd

Laatste nummer opnieuw bellen

Hoorn opnemen → Druk op de herhaaltoets



Snelkiesnummer bellen

1. Neem de hoorn op
2. Druk op de speciale toets
3. Druk op de gewenste cijfertoets (0–9)
4. Het opgeslagen snelkiesnummer wordt nu gebeld.



Doorgaan



4. Problemen? Meer hulp nodig?

Controleer:

- Zit de juiste telefoonkabel erin? (alleen meegeleverde gebruiken)
- Zit alles goed vast?

Raadpleeg de volledige handleiding of contact de klantenservice van HearPlanet via 088-5306099 op weekdays tussen 10 :00- 12:00 uur en 14:00 en 16:00 uur

Jouw nieuwe aankoop is gereed voor gebruik, veel plezier!